

APFP060B-HP

FICHE TECHNIQUE

FUT POLYPROPYLENE 60 L JAUNE AVEC OBTURATEUR

- Fabriqué en polypropylène
- Type litrage : 60L
- Couleur : JAUNE
- Destinés au conditionnement des déchets infectieux et cytotoxiques y compris les aiguilles et objets coupants



| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <i>Dimensions</i> | 400 x 330 x 680 mm |
| <i>Poids avec obturateur</i> | 2,1 kg |
| <i>Poids vide sans obturateur</i> | 1,98 kg |
| <i>Masse brute maximale</i> | 30 |
| <i>Homologation ADR</i> | 3H2/Y30/S/2006/F/BVT31918 |

Avantages

- 1 couvercle à trou diamètre 130 mm
- Système breveté, assemblage durable initial pour l'usage normé.
- Ouverture assistée sur charnière, mains libres pour le remplissage.
- Verrouillage étanche, temporaire et définitif, par vissage
- Manutention sécurisée : 3 poignées de transport solidaires du fût
- Fermeture inviolable sans effort et sans risque de compactage : 11 points de fermeture clipsables avec 2 doigts
- Stabilité exceptionnelle : base large, empreinte de gerbage sur couvercle
- Chariots d'aide à la manutention avec pédale d'ouverture du couvercle.
- Cuves identifiées par un numéro unique
- Formes ergonomiques, esthétique soignée



Conformité aux normes NF EN ISO 23907 et NF X 30-511 : perforation, étanchéité, stabilité, résistance des poignées, ...

Conformité à l'arrêté DGS du 24/11/2003 modifié par l'Arrêté du 27/06/2016

Autoclavage à 134°C

Homologués pour le transport par route, fer & mer des matières infectieuses des codes UN3291 & UN3249 selon les spécifications ADR/RID/IMDG

Contrôle de fabrications attesté par le BVT, garantissant une production selon les caractéristiques homologuées

Conditionnement

| | <i>Palette</i> |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Conditionnement</i> | 108 fûts |
| <i>Dimensions en cm</i> | 80 x 120 x 180 cm |
| <i>Poids en kg</i> | 227 kg |


Système de management certifié

DANGER


NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DE DECHETS
DECHETS A ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
RESPECTER LA LIMITE DE REMPLISSAGE - USAGE UNIQUE, NE PAS REUTILISER

MONTAGE

1) Poser le couvercle sur la cuve

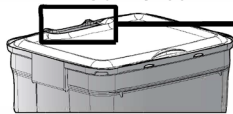

2) Clipper la charnière

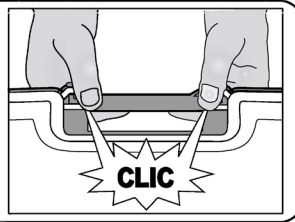

La charnière permet d'ouvrir et de fermer provisoirement le couvercle à chaque remplissage

Vous pouvez bloquer provisoirement le couvercle en l'insérant dans la bordure.

- Veiller à ce qu'aucun objet ne sorte de la cuve
- Vérifier que les bordures du couvercle et de la cuve sont sèches pour garantir l'étanchéité du joint

FERMETURE DEFINITIVE

Pincer la bordure du couvercle et de la cuve au niveau des 11 clips :



PRESERVEZ-VOUS DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES




SEUL LE PINCEMENT DE L'EXTREMITÉ DE LA BORDURE AVEC LA CUVE PERMET DE FERMER LE CONTENEUR EFFICACEMENT ET SANS EFFORT

Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage conformément aux instructions du fabricant (NF X30-505)

- comptez les clics entendus lorsque vous fermez
- en cas de doute, l'activation d'un clip se visualise sur le couvercle et/ou dans les trous de la bordure

COUVERCLE AVEC OBTURATEUR

POSITION 0 - MONTAGE Appuyer sur l'obturateur en ▼ et en 0 pour l'introduire

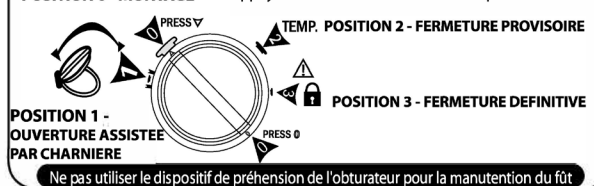

Ne pas utiliser le dispositif de préhension de l'obturateur pour la manutention du fût

CHARIOTS

Montage :



- 1) Poser le conteneur, dans son emplacement, couvercle à plat, charnière montée.
- 2) Lever le couvercle en position verticale et insérer la tringle supérieure dans la poignée

Démontage :

Retirer la tringle puis fermer définitivement le couvercle - extraire le fût.

VOIR LA VIDEO D'UTILISATION

